


Allbrand™ - Fascia ECG a 12 derivazioni con cinturino


INIZIARE →

13 Passi

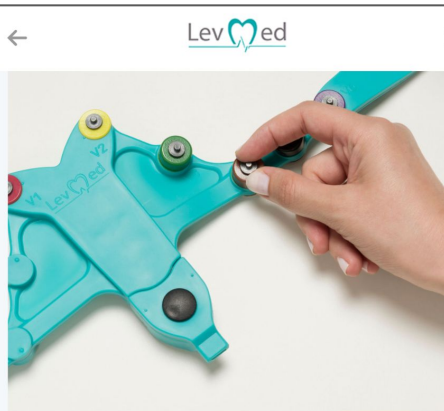


Passo1

Assicurarsi che le viti della fascia ECG siano serrate saldamente

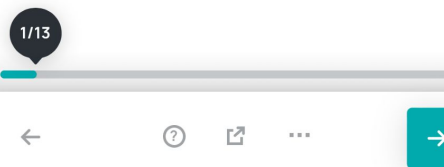


Passo2



Collegare il cavo paziente alle viti utilizzando gli adattatori a clip

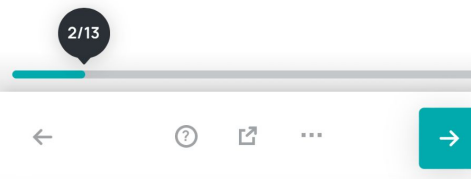

Passo3

Collegare il cavo paziente a ciascuna pinza periferica per arti

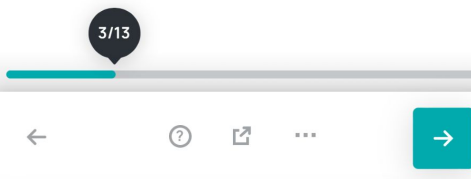

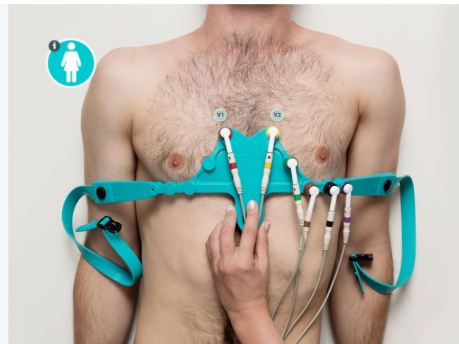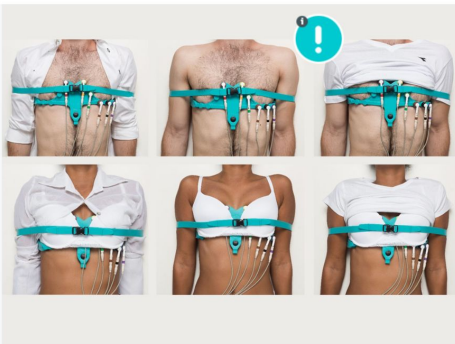

Passo4

Aprire o rimuovere la maglietta al paziente

4/13

Passo5

Bagnare i 6 elettrodi (V1-V6) e le 4 pinze periferiche con acqua tiepida

5/13

Passo6

Se necessario, piegare V1 & V2 per assicurare un contatto adeguato dell'elettrodo al petto del paziente


6/13

Passo7

Quando il paziente è sdraiato comodamente, applicare la fascia al petto con gli elettrodi V1 e V2 simmetricamente a lato dello sterno

7/13




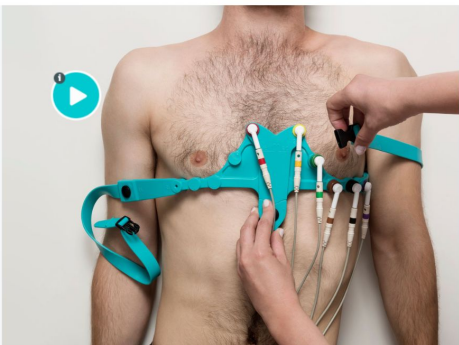

Passo8

Posizionare un laccio del cinturino sotto la metà del braccio, tra gomito e spalla, e poi sopra il braccio


8/13

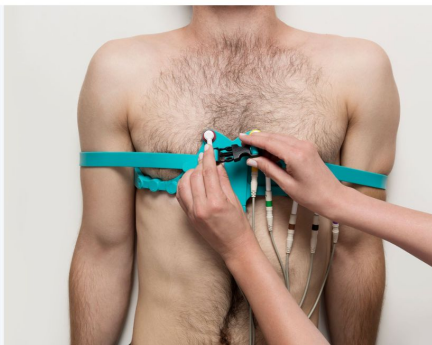

Passo9

Posizionare l'altro laccio nello stesso modo


9/13

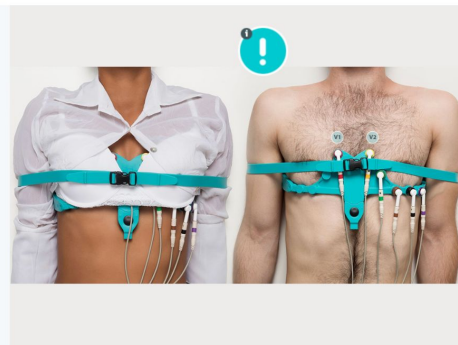

Passo10

Chiudere il cinturino sopra a V1 e V2

10/13

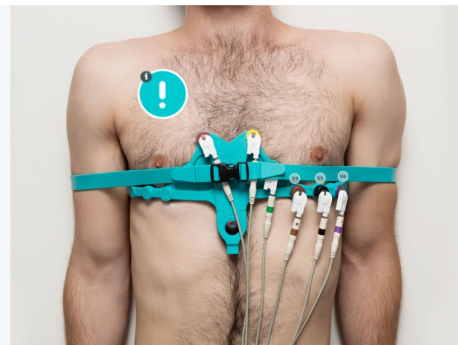


Passo11

Assicurarsi che gli elettrodi V4, V5 e V6 siano posizionati sotto il petto

11/13



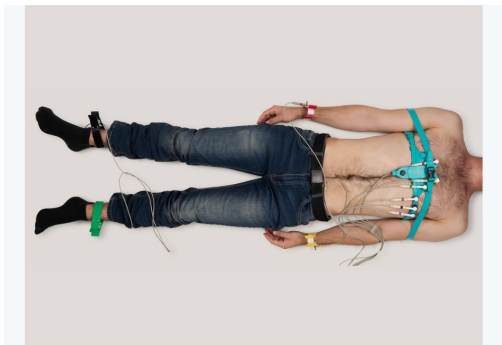

Passo12

Assicurarsi che il paziente sia rilassato e non irrigidisca i muscoli. Chiedere al paziente di non muoversi o parlare durante l'esame

12/13



Passo13

Le fasce ECG Allbrand™ godono della caratteristica antimicrobica Sanitized® per una protezione igienica ottimale. Dopo ogni paziente, pulire la fascia ECG Allbrand™ con una salvietta disinfettante. Utilizzare solo disinfettanti che sono dedicati all'utilizzo su dispositivi medici.

13/13



Molto bene!

EKG / ECG Electrodes Belt with Straps Alma Solutions